

Ventilador Dräger Evita® XL

Guía rápida de funcionamiento básico y manejo

MONTAJE DEL VENTILADOR



PUESTA EN MARCHA Y CHEQUEO DEL VENTILADOR

- 1 Encender el equipo (parte posterior).
- 2 El equipo realizará un auto-test. Una vez que salga la pantalla principal en el equipo, pulsar sobre el botón **Standby** y confirmar con el botón rotatorio. El mensaje “Standby activado” saldrá en la barra superior.
- 3 Pulsar sobre el botón de silenciar alarma a la derecha del mensaje y confirmar con botón rotatorio.
- 4 En la pantalla Standby pulsar sobre la 3ª pestaña vertical y elegir el tipo de humidificador a utilizar.
- 5 Para realizar la comprobación del equipo elegir la 4ª pestaña horizontal “**CHEQUEO SISTEMA**” y enseguida pulsar sobre el botón **CHEQUEO**. ¡El pulmón de prueba debe estar conectado!
- 6 Seguir instrucciones y contestar con Sí o No. Si la comprobación se ha realizado con éxito aparecerán todos los puntos marcados con la señal
- 7 A continuación se procede al chequeo del circuito, pulsando en la 3ª pestaña de la barra horizontal.



1. Elegir chequeo
2. Elegir CHEQUEO EQUIPO
3. Elegir CHEQUEO CIRCUITO


PUESTA EN MARCHA Y CHEQUEO DEL VENTILADOR (CONTINUACIÓN)

- 8** Elegir en la pantalla Standby entre “Nuevo Paciente” o “Paciente actual”. Al admitir paciente nuevo, se elimina el paciente actual y sus datos.
Si elegimos “Nuevo Paciente” elegir entre “Adulto” o “Pediátrico”.




- 9** Pulsar sobre la 2ª pestaña vertical para elegir entre ventilación invasiva o ventilación no invasiva.
- 10** Pulsar sobre el parámetro del peso corporal ideal e introducir el peso del paciente. El equipo determinará el VT y la frecuencia respiratoria basándose en este valor. Ajustar y confirmar con el botón rotatorio.

11 Pulsar pestaña “INICIAR” y confirmar con botón rotatorio para iniciar ventilación.

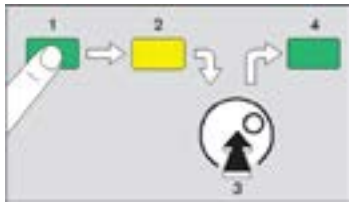


Información modo ventilatorio y algunos ajustes.
Al pulsar en esta zona se extiende el panel de configuración de los ajustes

Campos de curvas

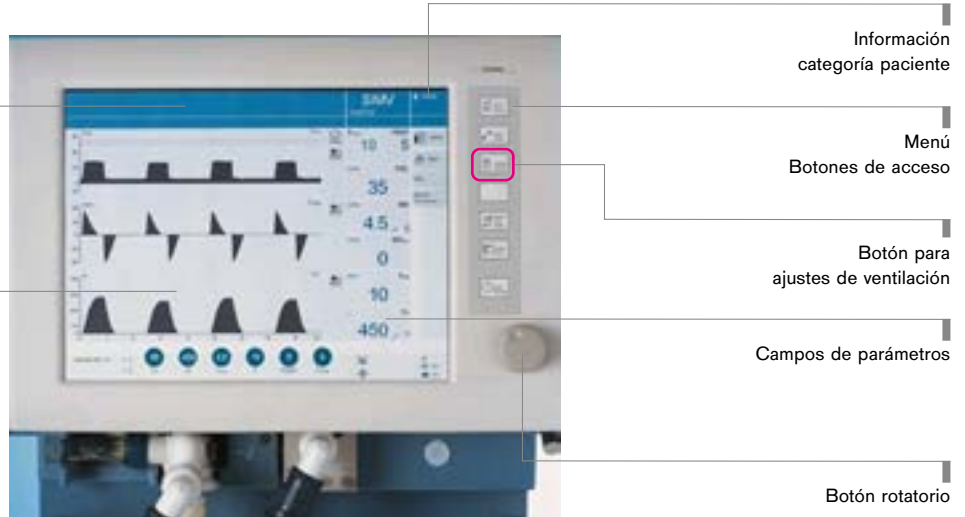

12 Para hacer ajustes de ventilación pulsar sobre el botón o al pulsar sobre los botones de la barra de terapia se expande el panel de ajustes de ventilación.

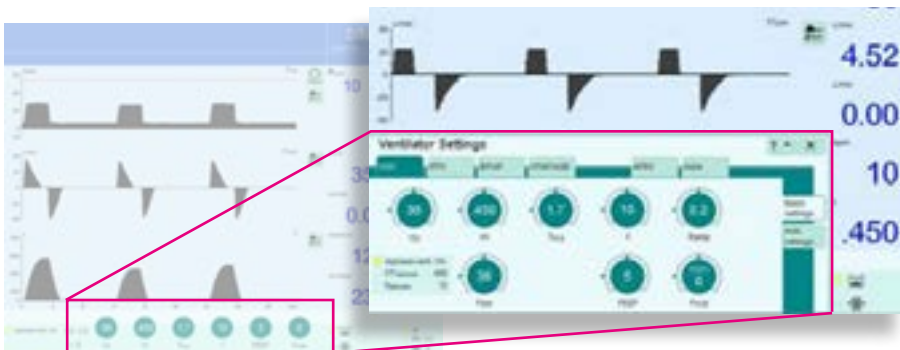

Campo donde se hacen los ajustes de ventilación. Al clicar en la flecha ↑ se expande el panel para cambiar los modos de ventilación. Ajustes rápidos se pueden hacer clicando sobre el parámetro (la rueda cambia a **amarillo**), ajustando con el botón rotativo y confirmando al final. **Hasta que no se confirme con el botón el cambio no se efectúa.**

NOTA: Esta guía rápida de uso no sustituye al manual de instrucciones facilitado por el fabricante.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.U.
Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel.: +34 900 11 64 24
atencionalcliente@draeger.com

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com